

INSTRUCTIONS ORALES

Ci-dessous, vous trouvez les instructions à lire aux personnes utilisant MedDrive pour la première fois. Seul le texte en noir est à lire à haute voix.

- Nous allons évaluer votre mémoire spatiale.

APPUYEZ sur « Mémoire spatiale »

Mémoire spatiale

APPUYEZ sur « continuer »

- Au centre vous avez une croix qui vous sert de repère. Pendant une seconde une première croix va apparaître à un autre endroit sur l'écran. Vous devez alors vous souvenir de l'emplacement de cette première croix.

APPUYEZ sur « continuer »

- Une deuxième croix va apparaître. Il vous faut alors mémoriser l'emplacement de cette dernière croix et également vous souvenir l'emplacement de la première croix. L'exercice peut alors s'arrêter ou elle peut continuer.

APPUYEZ sur « continuer »

- En l'occurrence, une troisième croix est apparue. Il vous faut alors mémoriser l'emplacement de cette dernière croix et toujours vous souvenir de l'emplacement de la première croix. Vous n'avez donc plus besoin de vous souvenir de l'emplacement de la deuxième croix. A nouveau l'exercice pourrait s'arrêter là ou continuer.

APPUYEZ sur « continuer »

- Dans cet exemple, une quatrième croix est apparue. Il vous faut alors mémoriser son emplacement et toujours vous souvenir de l'emplacement de la première croix. Vous n'avez donc plus besoin de vous souvenir de l'emplacement de la deuxième ni de la troisième croix. La séquence se termine lorsque plus aucune nouvelle croix n'apparaisse.

APPUYEZ sur « continuer »

- L'ordinateur vous demande alors en premier d'indiquer l'emplacement de la dernière croix qui est apparue. A l'aide de la souris, il vous faut alors positionner la pointe du curseur le plus près possible de l'endroit où se trouvait la dernière croix.

Déplacez le curseur à l'endroit voulu et cliquez sur le bouton de gauche. APPUYEZ sur « continuer »

- L'ordinateur vous demande ensuite d'indiquer l'emplacement de la première croix. Il est important d'être le plus précis possible car nous allons mesurer la distance entre l'endroit que vous indiquez et l'endroit où était véritablement la croix.

Déplacez le curseur à l'endroit voulu et cliquez sur le bouton de gauche. APPUYEZ sur « continuer »

- Vous allez maintenant pouvoir vous entraîner. Savez-vous utiliser une souris ?

Si la réponse est « oui », suivre les instructions qui suivent. Si la réponse est « non », demandez à la personne d'indiquer du doigt les emplacements à l'écran et utilisez la souris à leur place.

- Je vous laisse la souris. Quand vous serez prêt, appuyez sur « départ ». N'oubliez pas de bien mémoriser le premier et le dernier emplacement. Vous ne savez cependant jamais à l'avance quelle croix sera la dernière.

Laissez la personne débiter la tâche. Une fois que la série se termine, en même temps que l'indication apparaît à l'écran, dites :

- La dernière croix...
- La première croix...
- Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur « continuer ».

Laissez faire une deuxième fois. Une fois la série terminée, redonnez les indications :

- La dernière croix...
- La première croix...

Répéter cette opération une dernière fois.

- Nous allons maintenant pouvoir commencer l'épreuve. Vous allez avoir 30 séries. Ceci dure environ 7 minutes. Si vous souhaitez à un moment faire une brève pause, il vous suffit d'attendre avant de presser sur continuer. Dès que vous êtes prêt, appuyez sur « départ ».

Laissez la personne APPUYEZ sur « départ »

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES FACULTATIVES

La tâche se déroule habituellement dans le silence. Il peut cependant être nécessaire de donner des instructions supplémentaires dans certaines conditions.

1. **La personne oublie d'appuyer sur « continuer » :**
 - Lorsque vous serez prêt, vous pouvez appuyer sur « continuer ».
2. **La personne inverse la dernière et la première localisation:** *Pendant les trois mesures suivantes, donnez l'indication suivante en même temps qu'elle apparaît à l'écran.*
 - La dernière croix...
 - La première croix...

ERREURS

Lorsque la personne exécute l'exercice de manière non prévue et que ceci biaise les résultats, il y a alors erreur (lapse). Ceci peut nécessiter de répéter une mesure.

1. **La personne vous signale avoir confondu la dernière croix avec la première.**
Avant de répondre pour donner l'emplacement de la première croix, pressez sur « E ». Laissez ensuite la personne poursuivre l'épreuve. A la fin de l'épreuve, dans les résultats, le logiciel rapportera cette mesure comme étant une erreur.
2. **Pendant la série, vous remarquez un bruit, un déplacement dans la pièce, ou n'importe quel évènement inattendu qui peut faire baisser le niveau de concentration.**
Interrompez la série en pressant sur « E ». Laissez la personne reprendre une nouvelle série en appuyant sur « continuer » une fois que l'ambiance est à nouveau propice. A la fin de l'épreuve, dans les résultats, le logiciel rapporte le nombre d'erreur produit.
3. **Vous avez vu que la personne ne regardait pas l'écran lors de l'apparition de la première ou de la dernière croix.**
Ne laissez pas le participant répondre et pressez sur « E ». Laissez ensuite la personne poursuivre l'épreuve. A la fin de l'épreuve, dans les résultats, le logiciel rapportera cette mesure comme étant une erreur.